

## **Техническая спецификация по эндобоксам**

**Назначение** для укладки и хранения стерильного эндодонтического инструментария, транспортировки и использования на рабочем столе стоматолога.

**Область применения** : стоматология

**Свойства:** Вместимость контейнера - 24, 48, 72 инструмента. Контейнеры легко стерилизуются как химическим, так и термическим методом. Вставка контейнеров продумана для хранения и использования эндодонтических инструментов так, чтобы брать инструмент, не касаясь соседней ячейки. Крышка контейнера прилегает к контейнеру таким образом, что инструмент, вложенный в контейнер, остается стерильным в течение дня. Контейнеры не требуют специальных условий для применения.

**Способ применения:** Для подготовки к работе контейнер стерилизуется, согласно МУ-287-113 от 30.12.1998 химическим или термическим способом, в него вкладывается необходимый стерильный эндодонтический инструментарий, при соблюдении правил асептики и антисептики. Стерильный контейнер с инструментом хранится в камере с ультрафиолетовым излучением типа «Панмед», либо на стерильном столе до начала работы.

Эндодонтический инструмент можно стерилизовать непосредственно в самом контейнере в сухожаровом шкафу, согласно МУ-287-113 от 30.12.1998.

Стерильный контейнер используется однократно, даже если большая часть эндодонтического инструмента не была использована.

**Правила хранения** : после стерилизации контейнер с эндодонтическим инструментом хранится в закрытом виде в ультрафиолетовом ящике, либо на стерильном столе при комнатной температуре в хорошо проветриваемом помещении, при этом необходимо следовать обычным гигиеническим мерам предосторожности.

**Упаковка:** упаковочная коробка из картона.

**Гарантия:** Срок хранения контейнера пять лет. Г гарантийный срок службы контейнера два года.