


Установка стекловолоконных штифтов

Установка стекловолоконных штифтов



1. Пломбировка каналов

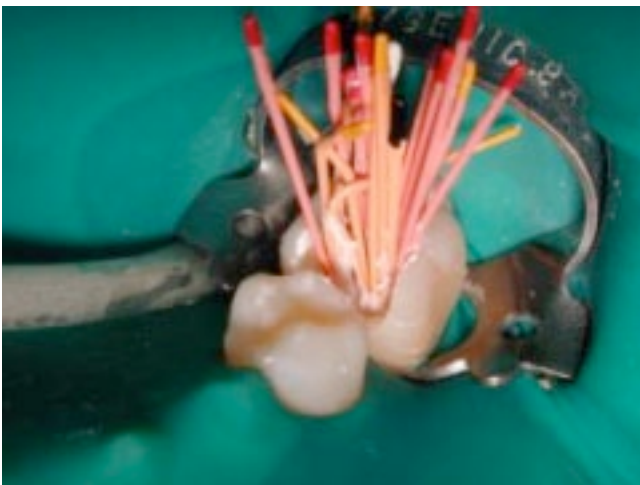



Запломбируйте канал.

После пломбировки каналов удалите гуттаперчу в обычной для себя манере, оставляя запломбированными устья корневых каналов.

2. Подбор размера штифта



3. Последовательно обработайте ложе под штифт, используя рекомендуемые производителем номером и видом инструмента.

- Под штифт Ø1мм последовательно использовать Largo № 3 и Largo № 4.
- Под штифт Ø1,25мм последовательно использовать Largo № 3, Largo № 4 и Largo № 5.
- Под штифт Ø1,5мм последовательно использовать Largo № 3, Largo № 4, Largo № 5 и Largo № 6.



4. После примерки и перед установкой следует обработать штифты обезжиривающим составом. Это удалит с них лишние частицы, примеси, загрязнения, полученные после распаковки и подгонки штифтов. Для дополнительной адгезии рекомендуется обработать поверхность штифта Handyblaster'ом или аналогичным по принципу действия, прибором.



5. Нанесите на устанавливаемый штифт адгезив, который сочетается с Вашей фиксирующей системой (универсальный или персонализированный).



6. Обработайте подготовленный канал и полость 37-процентной фосфорной кислотой в течение 15-20 секунд. Тщательно промойте полость и подготовленный канал водой (при промывании канала использовать эндодонтический шприц). Просушите полость и подготовленный канал (уберите избыток влаги) стараясь не пересушить, как Вы это делаете на живых зубах.



7. Внесите в полость зуба и в подготовленный корневой канал адгезив, который сочетается с Вашей фиксирующей системой (универсальный или персонализированный).




8. Подсушите полость струей воздуха. Избыток адгезива из подготовленного канала уберите при помощи как минимум трёх бумажных штифтов размером более №45.



9. Используйте фиксирующую композитную систему двойного или химического отверждения на Ваш выбор. Вносите фиксирующий материал в подготовленный под штифт канал каналонаполнителем на достаточных для проникновения фиксирующего материала оборотах.



10. После внесения фиксирующей композитной системы немедленно установите штифт. Обратите внимание на возможный воздушный пузырь в фиксирующем материале, после установки штифта.

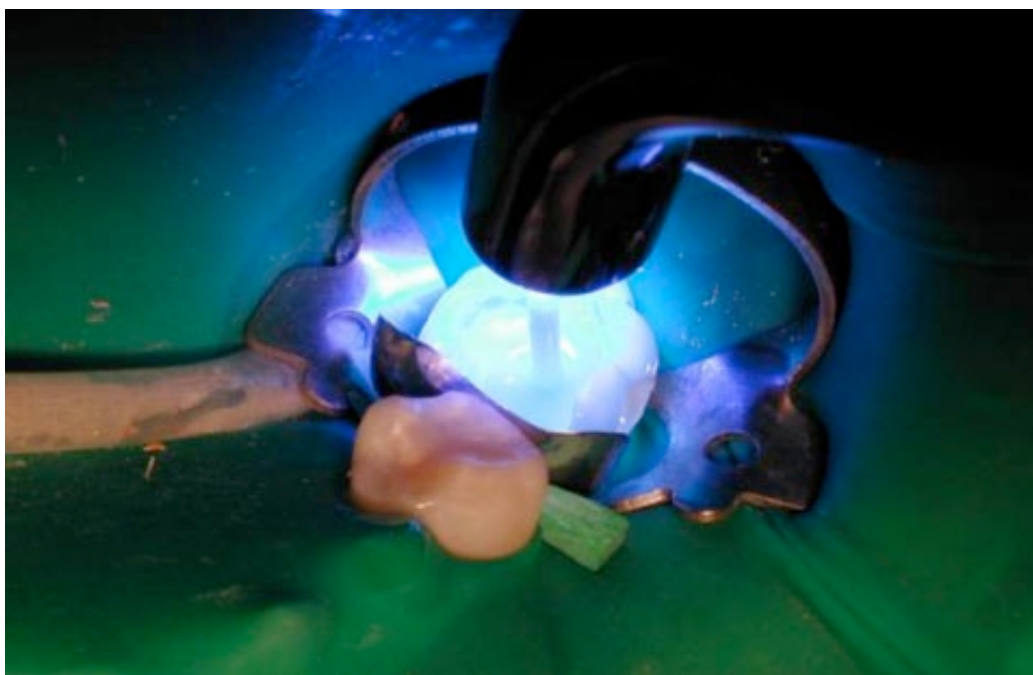

11. Отвердите используемый фиксирующий материал согласно инструкции производителя.



12. Восстановите структуру коронковой части зуба выбранным Вами материалом.

- Эти штифты позволяют ускорить и облегчить проведение реставрации.
- При этом одновременно снижается стоимость лечения для пациента и затраты времени для врача.

Вся процедура постановки стекловолоконного штифта занимает не более 4-х минут